

INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE. CONSERVACIÓN Y TRASLADO DE LAS MISMAS AL PRICAI- FUNDACIÓN FAVALORO

Extracción de muestras de sangre

1- Crossmatch frente a panel (FP):

- receptor: 5 ml de sangre con EDTA y 5ml sin anticoagulante

2- Crossmatch familiar o pretx. CMF/CMPTx:

- receptor : 5 ml de sangre con EDTA y 5 ml sin anticoagulante
- donante: 10 ml de sangre con EDTA

3- Tipificación clase I (AB) y/o clase II (DR,DQ): Entre 5 y 10 ml de sangre con EDTA de cada uno de los integrantes del grupo en estudio.

- Si la orden tiene AB, DR, FP: extraer 10 ml de sangre con EDTA y 5 ml sin anticoagulante.

- Si la orden tiene AB, DR, FP y/o CMF: Extraer 15 ml de sangre con EDTA y 5 ml sin anticoagulante del receptor, y 15 ml de sangre con EDTA del donante.

Rotulado de las muestras

Todas las muestras **deben estar rotuladas en forma clara**. En el rótulo debe constar el apellido y el nombre de la persona a quien pertenece la muestra, y la fecha de extracción de la misma.

Las muestras deben ser enviadas en tubo, NO EN JERINGA.

Las muestras que no estén rotuladas como se indica **no serán aceptadas**.

Las muestras deben ser derivadas junto con el formulario de derivación.

Conservación de las muestras

Si las muestras se envían al PRICAI dentro de las 24 horas siguientes a la extracción, las mismas pueden conservarse a temperatura ambiente (menos de 20° C) **sin exponer a la luz solar** ó refrigeradas (en heladera a 2-10° C). **NO CONGELAR.**

Las muestras deben ser enviadas refrigeradas.

Los envíos de muestras serán recepcionadas de lunes a jueves en el horario de 09.00 a 15.00 y los viernes sólo hasta las 11.00. **SIN EXCEPCION**